



Manuale Utente v.5.1

MuoviPro

Sistema di acquisizione wireless per segnali bioelettrici portatile



Leggere attentamente questo manuale prima di usare MuoviPro

1	DESCRIZIONE GENERALE	5
2	KIT DEL MUOVIPRO.....	6
3	UTILIZZATORE FINALE	6
3.1	Controindicazioni.....	7
3.2	Effetti collaterali	7
4	AVVERTENZE.....	7
5	LEGENDA DEI SIMBOLI POSTI SUL MUOVIPRO E NEL MANUALE	9
6	SPECIFICHE TECNICHE	11
7	DESCRIZIONE DETTAGLIATA.....	14
7.1	Sonda di prelievo Muovi - Controlli, indicatori e connettori	14
7.1.1	Connettore di ingresso e ricarica	15
7.1.2	Pulsante ON/OFF	16
7.1.3	Indicatori LED.....	16
7.1.4	Connettore Patient Ref.....	18
7.2	SyncStation - Controlli, indicatori e connettori	18
7.2.1	Connettori.....	20
7.2.2	Indicatori LED.....	21
7.2.3	Controlli	22
8	UTILIZZO DEL MUOVIPRO	23
8.1	Utilizzo sonda Muovi	23
8.1.1	Interfaccia WiFi della sonda Muovi	23
8.1.2	Segnali.....	24
8.1.3	Elettrodi di prelievo e connessione al paziente.....	28
8.1.4	Procedura di ricarica delle sonde Muovi	30
8.1.5	Trasferimento dei dati wireless	31

8.1.6	Pagina web interna Muovi	31
8.1.7	Nomenclatura sonde	35
8.2	Utilizzo della SyncStation	36
8.2.1	Interfacce di rete della SyncStation	36
8.2.2	Trasferimento dati verso il PC	37
8.2.3	Pagina web interna SyncStation	44
9	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	47
10	MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL MUOVIPRO	48
11	ANALISI DEL RISCHIO	50
11.1	Norme generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali CEI EN 60601-1 ..	50
12	DESTINAZIONE D’USO	52
13	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	53
14	GARANZIA.....	54
14.1	Condizioni di garanzia.....	54

1 DESCRIZIONE GENERALE

Il MuoviPro è uno strumento formato da un numero di sonde wireless (Muovi) compreso tra una e quattro e da una base di ricarica e sincronizzazione (SyncStation). Le sonde Muovi, sono amplificatori wireless a 32 canali e sono dispositivi miniaturizzati ed indossabili, progettati per acquisire in totale fino a 128 segnali bioelettrici. La sonda Muovi è in grado di rilevare segnali elettromiografici di superficie (HD-sEMG) e segnali elettroencefalografici (EEG) per Brain Computer Interface (BCI). Ogni sonda effettua amplificazione, filtraggio, conversione analogico/digitale e trasferimento wireless dei segnali acquisiti al PC, il tutto per la visualizzazione e l'archiviazione in tempo reale.

La sonda Muovi non necessita di adattatori per la connessione degli elettrodi di acquisizione, questi ultimi, infatti, vengono collegati direttamente allo strumento.

La base di ricarica e sincronizzazione chiamata SyncStation gestisce la connessione di più sonde Muovi contemporaneamente ed inoltre, rende disponibile quattro ingressi ausiliari.

Sul sito <https://otbioelettronica.it/downloads>, è disponibile il software freeware per la visualizzazione e l'archiviazione in tempo reale dei segnali bioelettrici, chiamato OT BioLab+, progettato da OT Bioelettronica.

Il MuoviPro è uno strumento progettato per la ricerca clinica, effettuata da personale qualificato ed è completamente sicuro per il paziente. La sicurezza viene garantita avendo rispettato i requisiti di progettazione per i dispositivi con parte elettronica applicata al paziente.

2 KIT DEL MUOVIPRO

- Da 1 a 4 sonde Muovi a 32 canali;
- 1 SyncStation;
- 1 cavo Ethernet;
- 1 Alimentatore AC/DC (36W - 12V);
- 1 Barattolo di crema conduttiva;
- 4 Fascette di massa da polso;
- 4 Fascette di massa da caviglia;
- 4 Cavi di massa;
- Schiere e matrici di elettrodi di diverso tipo a seconda della richiesta del cliente;
- 1 Manuale utente del MuoviPro.

3 UTILIZZATORE FINALE

Il dispositivo MuoviPro permette la registrazione, non invasiva, di segnali bioelettrici (sEMG ed EEG) prelevati con elettrodi di superficie. MuoviPro è destinato ad essere impiegato, in primo luogo, come dispositivo da laboratorio, in secondo luogo, può essere utilizzato in ambito ambulatoriale fisioterapico per valutare, in maniera qualitativa e quantitativa, l'attività muscolare. Per l'utilizzo del dispositivo MuoviPro nelle registrazioni HD-sEMG ed EEG, l'utilizzatore finale deve avere familiarità con le tecniche di prelievo in questione ed avere una formazione sull'interpretazione dei segnali prelevati.

Il profilo dell'utilizzatore è un operatore specializzato che ha:

- a) Conoscenza minima e nozioni di base del corpo umano
- b) Comprensione della lingua: Italiano e/o Inglese
- c) Formazione minima necessaria per l'utilizzo del dispositivo
- d) Menomazioni ammissibili:
 - riduzione dell'udito massima del 40% con udito residuo al 60%
 - riduzione della vista del 40% con vista residua al 60%

Profilo paziente:

- a) Et : >15 Anni
- b) Peso: non rilevante
- c) Salute: privo di problemi cardiologici e non portatore di pacemaker
- d) Nazionalit : indifferente

3.1 Controindicazioni

Il MuoviPro non ha particolari controindicazioni, quando usato in combinazione con PC ed altri apparecchi elettrici connessi alla rete, verificare che questi rispettino le norme di sicurezza elettrica relative.

3.2 Effetti collaterali

Nel prelievo di segnali HD-sEMG o EEG non si evidenzia alcun effetto collaterale. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione delle parti, che possono venire in contatto con il paziente, sono biocompatibili. Possibili reazioni allergiche della cute (es. arrossamento della cute) sono ridotte al minimo riducendo la durata del protocollo di acquisizione.

4 AVVERTENZE

L'utilizzo del sistema MuoviPro   assolutamente proibito nelle seguenti condizioni:

- Mentre sono utilizzati altri strumenti di monitoraggio.
- Mentre sono utilizzati strumenti di elettro-chirurgia, strumenti per terapie a onde corte o microonde.
- Da persone incapaci di intendere e di volere.
- Quando lo strumento   danneggiato.
- In prossimit  di sostanze infiammabili o in ambienti con elevate concentrazioni di ossigeno.
- Da persone che utilizzano sistemi di sopravvivenza che possono essere disturbati da campi di interferenza elettromagnetica, come ad esempio pacemakers.

Le seguenti precauzioni vanno osservate:

- Usare solo elettrodi forniti dal distributore: il dispositivo MuoviPro è testato e garantito per l'uso con gli elettrodi in dotazione.
- In caso di penetrazione di sostanze estranee nel dispositivo contattare immediatamente il produttore. In caso di forte shock del sistema MuoviPro (es. caduta sul pavimento) verificare che non siano presenti crepe del contenitore o lesioni di qualsiasi natura. In caso di dubbio contattare il produttore.
- Il sistema MuoviPro è soggetto a influssi ambientali (ad esempio disturbi elettrostatici provocati da motori elettrici operanti nelle vicinanze o altre sorgenti di disturbi elettromagnetici). Tali interferenze possono condizionare le misurazioni dei segnali EMG ed EEG. Non essendo tali parametri utilizzati per la formulazione di diagnosi, non costituiscono alcun pericolo per il paziente, si prega di considerare sempre le interferenze ed il rumore nelle sessioni di processing dei segnali.
- La connessione del dispositivo MuoviPro con altre apparecchiature (ad esempio PC) deve essere effettuata secondo norma EN 60601-1-1 relativa a sistemi elettromedicali.
- L'utilizzo del sistema MuoviPro è ristretto a personale adeguatamente formato.
- Valutazioni inesatte possono essere conseguenza dell'utilizzo dell'apparecchiatura alla presenza di forti fonti di disturbo (ad es. forti campi elettromagnetici), che sono però facilmente riconoscibili da personale opportunamente formato.



Il dispositivo non deve essere utilizzato in qualsiasi altro modo diverso da quanto indicato in queste istruzioni.

5 LEGENDA DEI SIMBOLI POSTI SUL MUOVIPRO E NEL MANUALE



Numero di serie



Numero identificativo del dispositivo a catalogo



Classe BF per le componenti applicate al paziente



Produttore



Non smaltire questo prodotto come rifiuto non differenziato. Preparare il riutilizzo o la raccolta differenziata del prodotto secondo le disposizioni della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Marcatura CE



Leggere le istruzioni



Non utilizzare se la confezione è stata danneggiata o aperta



Limiti di temperatura a cui il dispositivo può essere esposto in sicurezza



Range di umidità a cui il dispositivo può essere esposto in sicurezza



Range di pressione atmosferica a cui il dispositivo può essere esposto in sicurezza



Lattice di gomma naturale, non è stato utilizzato, nella fabbricazione del prodotto, del suo contenitore o della sua confezione.

RoHS

L'apparecchiatura elettronica è in conformità alla Direttiva RoHS sulla restrizione nell'uso di sostanze pericolose

Grado di protezione:

IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12.5 mm

Non protetto da caduta di gocce d'acqua

—————
12VDC – 36W

L'apparecchiatura è adatta solo per la corrente continua; con indicazione di tensione nominale e potenza di alimentazione.

Model: MuoviPro x

Variante: x = 32: 32 canali (OT0130A), x = 64: 64 canali (OT0130B), x = 96: 96 canali (OT0130C), x = 128: 128 canali (OT0130D)



Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima della messa in esercizio del dispositivo.

6 SPECIFICHE TECNICHE

MuoviPro è un dispositivo a batteria, progettato per garantire un alto livello di sicurezza per il paziente e per l'operatore, in tutte le condizioni di utilizzo. L'isolamento tra il dispositivo MuoviPro ed il PC per la visualizzazione e l'archiviazione dei dati in tempo reale è intrinsecamente ottenuto con il trasferimento dati wireless. L'unico connettore disponibile su ciascuna sonda Muovi è utilizzato o per l'interfaccia con elettrodo di prelievo (matrice di elettrodi) oppure per la ricarica della batteria. Si evita così la possibilità di alimentare la sonda Muovi da una fonte esterna mentre è collegata al paziente per il prelievo dei segnali bioelettrici.

Il connettore per gli ingressi ausiliari, presente sulla base SyncStation, è destinato all'interfaccia con altri dispositivi mobili (goniometri, accelerometri o amplificatori per altri segnali biologici). Tale connessione deve essere eseguita in conformità con la Norma Europea EN 60601-1-1 sui dispositivi medici. La Tabella 6.1 mostra una lista delle versioni del sistema MuoviPro.

Configurazioni di sistema	Esempio di sonde collegabili al sistema
128 canali	Quattro sonde a 32 canali
96 canali	Tre sonde a 32 canali
64 canali	Due sonde a 32 canali
32 canali	Una sonda a 32 canali

TAB. 6.1: Lista delle versioni del sistema MuoviPro.

Le specifiche tecniche del MuoviPro sono mostrate nelle Tabelle 6.2 e 6.3.

MuoviPro	Numero di canali totali	132
	Numero Massimo di sonde Muovi	4
	Frequenza di campionamento selezionabile	500 o 2000 Hz
Accessorio Muovi	Funzioni	Acquisizione di 32 segnali EMG o EEG
	Numero canali	32
	Filtro passa basso	$\sim F_{SAMP}/4$
	Filtro passo alto	Accoppiamento in DC oppure filtro digitale a 10 Hz
	Livello di rumore riferito all'ingresso	$< 4 \mu V_{RMS}$
	Resistenza di ingresso	500 M Ω
	Range in ingresso	0 – 3.3 V
	Batteria	Batteria LiPo 3,7V
	Vita della batteria – Tempi di ricarica	Acceso/Trasmissione Continua - 4 ore/2 ore, ricarica completa - 2 ore e 30 minuti
	IMU	
	Numero e tipologia segnali	<ul style="list-style-type: none"> - Accelerometro triassiale (+/- 4g) - Giroscopio triassiale (2000 °/s) - Magnetometro triassiale
	Conversione dati e comunicazione	
	Risoluzione del convertitore A/D	24 bit
	Dinamica di ingresso del convertitore A/D	± 2.4 V
Trasferimento dati al PC	WiFi attraverso TCP socket	

TAB. 6.2: Specifiche tecniche del dispositivo MuoviPro e delle sonde Muovi

Accessorio SyncStation	Funzioni	Ricarica delle sonde Muovi, hub di ricezione dati da 4 sonde Muovi, interfaccia verso il PC e acquisizione di 4 segnali ausiliari
	Comunicazione verso PC	Ethernet
	Segnali in ingresso	128 generati da 4 sonde e 4 segnali acquisiti da ingressi ausiliari
	Segnali in uscita	132 segnali digitali su cavo Ethernet
	Canali ausiliari	4 (3 non condizionati – 1 condizionato)
	Alimentazione	Alimentatore 12V _{DC} fornito con il sistema
	Dettagli dei canali ausiliari non condizionati	
	Numero canali	3
	Risoluzione	16 bit
	Guadagno	0.5 V/V (adatta il range di ingresso ± 5 V alla dinamica del ADC 5V)
	Filtro passa basso	Non filtrati
	Filtro passa alto	Accoppiati in DC
	Livello di rumore riferito all'ingresso	$< 6 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$
	Range in ingresso	± 5 V
	Dettagli del canale ausiliario condizionato (per celle di carico)	
	Numero canali	1
	Risoluzione	16 bit
	Guadagno	205 V/V
	Filtro passa basso	15 Hz
	Filtro passa alto	Accoppiato in DC
Livello di rumore riferito all'ingresso	$< 6 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$	
Alimentazione cella di carico	5 V	

TAB. 6.3: Specifiche tecniche della base SyncStation.

7 DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Il dispositivo MuoviPro è un sistema costituito da 4 sonde portatili, alimentate a batteria, per l'acquisizione di segnali EMG di superficie, o EEG per Brain Computer Interfaces, e da una base di ricarica e sincronizzazione chiamata SyncStation, quest'ultima permette inoltre l'acquisizione di 4 canali ausiliari: di cui 3 sui connettori BNC e 1 su connettore dedicato per la connessione ed alimentazione di una cella di carico. I segnali possono essere trasferiti al PC per la visualizzazione e la registrazione in tempo reale:

- da una sonda Muovi alla volta, utilizzando la rete WiFi generata dalla sonda stessa
- da 4 sonde Muovi contemporaneamente, mediante un primo trasferimento dei segnali in modalità wireless alla base SyncStation che funziona da hub wireless, ed un secondo trasferimento wired dalla base SyncStation al PC mediante cavo Ethernet.

Le sonde Muovi, possono quindi fungere da access point WiFi, oppure possono connettersi alla rete generata dalla base SyncStation. In entrambi i casi, la sonda Muovi ha un indirizzo IP fisso con cui è possibile raggiungere la sua pagina web, utilizzando qualsiasi browser. Tramite browser è possibile configurare, controllare e aggiornare il firmware della sonda stessa. Il trasferimento dei dati al PC è ottenuto tramite un socket TCP aperto dalla SyncStation come server. Una stringa di configurazione, inviata alla sonda Muovi, può impostare tutti i parametri di acquisizione e avviare il trasferimento dei dati. Il protocollo di comunicazione è disponibile per lo sviluppo personalizzato insieme al codice dimostrativo Matlab.

7.1 Sonda di prelievo Muovi - Controlli, indicatori e connettori

La sonda Muovi è un dispositivo progettato per acquisire 32 segnali EMG di superficie attraverso matrici di elettrodi oppure attraverso cuffie per EEG per brain computer interface a 32 canali. Nella figura 7.1 è rappresentata la sonda con indicazione dei diversi controlli, indicatori e connettori presenti sulla stessa.

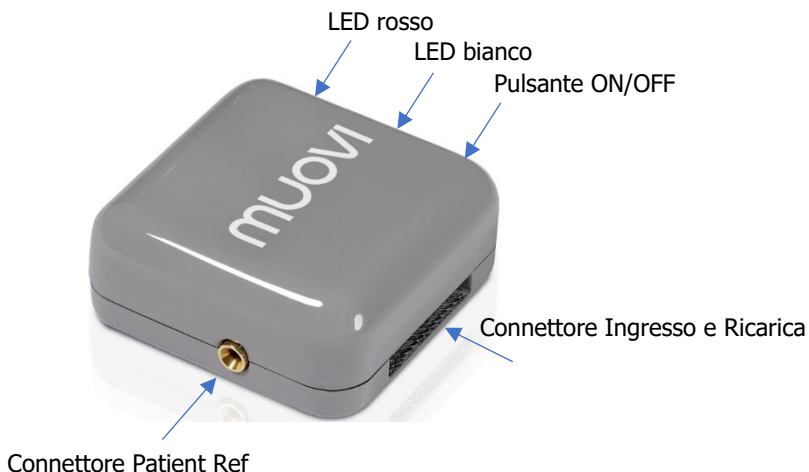


FIG. 7.1: Sonda Muovi: controlli, connettori e indicatori.

La sonda Muovi può essere completamente configurata tramite la sua pagina web, mentre il pulsante ON/OFF fornisce solo un rapido accesso alle funzioni di base, visualizzate dai led.

7.1.1 Connettore di ingresso e ricarica

Il connettore di ingresso a 40 pin è l'interfaccia tra il Muovi e gli elettrodi ed è utilizzato anche per la ricarica della batteria interna.

Il pinout del connettore a 40 pin è disponibile, su richiesta, per sviluppi personalizzati. Fare riferimento alla sezione 8.1.3 per ulteriori dettagli sulle matrici disponibili.

7.1.2 Pulsante ON/OFF

Questo pulsante accende e spegne la sonda Muovi rimuovendo completamente l'alimentazione della batteria da tutte le sue parti.

7.1.3 Indicatori LED

Per identificare lo stato del Muovi sono stati installati due LED. Ciascuno di essi riflette lo stato di una diversa attività del dispositivo:

- 1) il LED bianco è correlato al trasferimento dei dati wireless
- 2) il LED rosso evidenzia gli errori o i problemi

I due LED sono indipendenti e le informazioni, fornite da ciascuno di essi, vengono visualizzate ciclicamente per un dato numero di lampeggi. Nella Tabella 7.1 sono evidenziati i diversi stati e il relativo numero di lampeggi del LED.

N. di lampeggi	1	2	3	4
LED Bianco	WiFi attivo	Connesso alla rete	Connesso al socket TCP	Trasferimento dati
LED Rosso	Perdita di dati durante il trasferimento WiFi	-	Livello batteria basso	-

TAB. 7.1: Relazione tra il numero di lampeggi per ogni LED e lo stato della sonda Muovi

LED Bianco

Questo LED indica lo stato della connessione WiFi e il trasferimento dei dati attraverso un socket TCP.

Il LED bianco fornisce informazioni diverse a seconda dello stato in cui si trova il Muovi.

Quando Muovi agisce come un punto di accesso:

- a) un lampeggio del LED bianco indica che la rete è stata generata ed è disponibile per la connessione da un altro dispositivo

b) due lampeggi indicano che un dispositivo è connesso alla rete generata dal Muovi

Se Muovi è configurato per connettersi alla rete della SyncStation:

a) un lampeggio indica che il Muovi è attivo e che sta cercando una rete;

b) due lampeggi indicano che il Muovi si è connesso con successo alla rete esterna.

Indipendentemente dal ruolo della sonda Muovi, tre lampeggi del LED bianco indicano che la sonda è connessa come client a un TCP generato da un dispositivo server (solitamente il PC utilizzato per la visualizzazione e la registrazione di dati in tempo reale); quattro lampeggi del LED bianco indicano che la sonda sta trasferendo dati, attraverso il TCP socket, ad un server. Utilizzando la comunicazione tramite SyncStation la condizione dei due lampeggi non si presenta, perché la connessione al socket TCP avviene nello stesso istante in cui la sonda si collega alla rete generata dalla SyncStation. Nel caso invece di connessione diretta della sonda al PC e l'utilizzo del software OT BioLab+, la connessione al socket avviene contestualmente all'inizio del trasferimento dati passando quindi direttamente da due lampeggi a quattro lampeggi del led bianco.

LED Rosso

Il LED rosso viene utilizzato per avvisare l'utente di un errore o di una condizione critica. Un lampeggio singolo del LED rosso indica che sono stati persi campioni nel trasferimento dati wireless, questa situazione si manifesta quando il buffer dati interno al Muovi, è pieno e la trasmissione dati non è possibile, l'acquisizione del successivo campione di segnale creerà un reset del buffer di dati interno con la perdita di una quantità di dati, pari alla dimensione del buffer (fare riferimento alla sezione 8.2 per ulteriori dettagli). Il LED rosso smetterà di lampeggiare, se la condizione sopra descritta è temporanea

(ad esempio la sonda Muovi rimane per un tempo limitato troppo lontano dal PC di acquisizione) e quindi il trasferimento dei dati si è riavviato correttamente.

La perdita dei dati registrati può comunque essere verificata offline, controllando uno dei canali accessori (vedere la sezione 8.2 per ulteriori dettagli).

Tre lampeggi del LED rosso corrispondono a un livello della batteria inferiore al 20%. Si noti che non vi è priorità nella segnalazione degli errori e viene visualizzato sempre l'ultimo errore rilevato, con il numero di lampeggi del LED rosso corrispondenti.

In generale, il livello di batteria scarica prevarrà sulle altre condizioni di errore, semplicemente perché il livello della batteria viene monitorato più frequentemente degli altri parametri.

7.1.4 Connettore Patient Ref

Il connettore Patient Ref, banana femmina da 2mm, è il riferimento del paziente e deve essere posizionato utilizzando una fascetta di massa (fornita nel kit del sistema) oppure un elettrodo pregelato, posizionati sul corpo del paziente in un punto privo di attività elettromiografica (es. polso o caviglia). Le fascette di massa, per garantire un buon contatto elettrico con il paziente, devono essere bagnate. Tutti i segnali EMG o EEG sono acquisiti come differenza tra il potenziale prelevato da ogni singolo elettrodo e il potenziale del riferimento, generando pertanto dei segnali monopolari.

7.2 SyncStation - Controlli, indicatori e connettori

Il sistema MuoviPro è dotato di una base di ricarica e sincronizzazione chiamata SyncStation, riportata in Figura 7.2, questa è in grado di ricaricare fino a 4 sonde Muovi simultaneamente. A fianco dell'alloggiamento dedicato ad ogni sonda Muovi, sulla SyncStation, vi è un LED (vedi Fig. 7.2) che indica lo stato di ricarica della rispettiva sonda. La base SyncStation, oltre a costituire la piattaforma di ricarica delle singole sonde, svolge le seguenti funzioni:

- Sincronizzazione dei segnali ricevuti in Wi-Fi dalle 4 sonde Muovi
- Acquisizione dei 4 segnali ausiliari, 3 BNC-IN e 1 per celle di carico
- Generazione segnale di trigger, mediante pressione del pulsante dedicato (vedi Fig. 7.2)
- Uscita trigger tramite BNC-OUT (vedi Fig. 7.2)

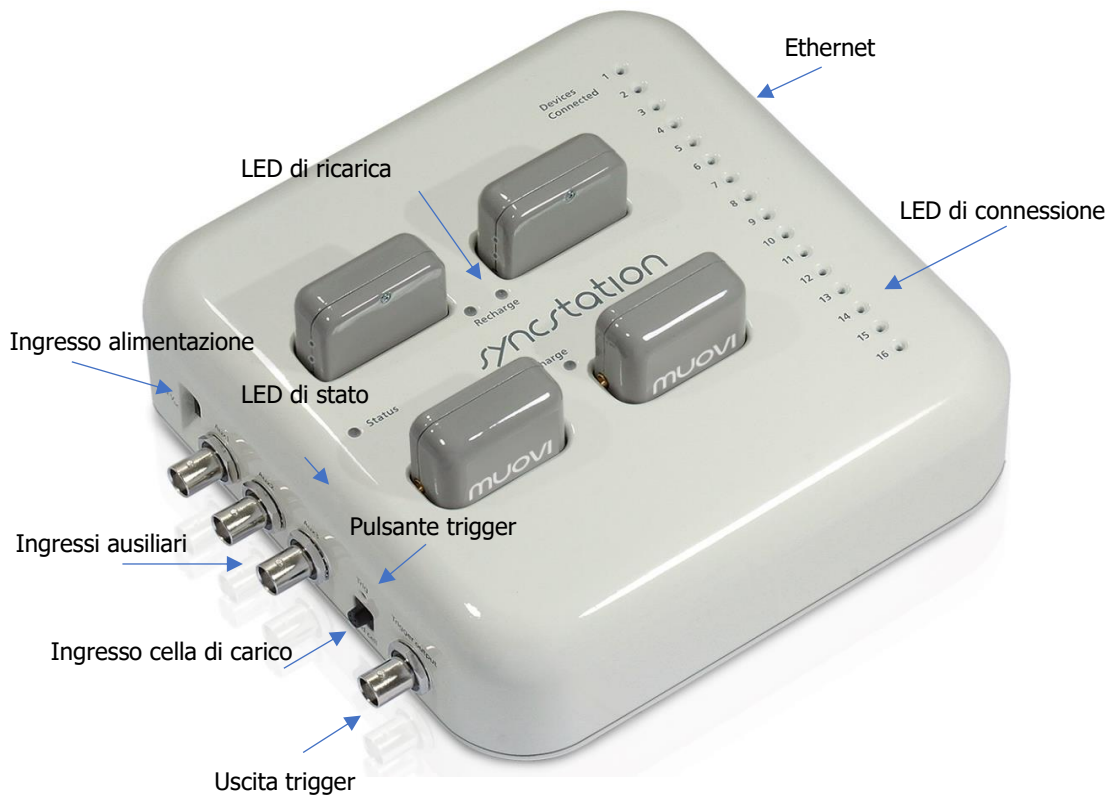


FIG. 7.2: SyncStation: controlli, connettori e indicatori.

I controlli, indicatori e connettori della base SyncStation sono mostrati in figura 7.2 e sono descritti a seguire.

7.2.1 Connettori

Sulla SyncStation sono presenti (con riferimento alla Fig. 7.2): 6 connettori posizionati sul lato sinistro, 1 connettore posizionato sul lato destro e 4 connettori posizionati sul lato superiore:

- Ingresso alimentazione: SyncStation deve essere alimentata utilizzando l'alimentatore DC fornito in dotazione ($12V_{DC}$). SyncStation si avvia automaticamente quando il jack di alimentazione viene collegato, l'interruttore ON/OFF non è presente.
- 3 Ingressi ausiliari BNC: questi connettori possono essere utilizzati per acquisire segnali amplificati forniti esternamente, il range di ingresso è $\pm 5 V$ e la risoluzione del convertitore A/D utilizzato è 16 bit. I tre ingressi ausiliari funzionano anche se nessuna sonda Muovi è connessa alla base, in questa modalità la SyncStation può essere paragonata ad una scheda di acquisizione a 3 canali. Per i settaggi dei canali di acquisizione ausiliari relativi ai BNC fare riferimento al manuale utente del software OT BioLab+.
- Ingresso ausiliario per cella di carico: oltre ai tre ingressi ausiliari generici sopradescritti vi è un ulteriore ingresso dedicato al collegamento e l'alimentazione di una cella di carico (segnale da amplificare). Il connettore in questione è a quattro contatti e su due di questi è presente un'alimentazione stabilizzata di 5V per l'alimentazione del ponte di Wheatstone della cella di carico. La piedinatura del connettore è riportata in figura 7.3. Il canale amplifica il segnale della cella di carico con un guadagno di 205 V/V e filtra il segnale passa basso a 15 Hz.
- Uscita Trigger: questo connettore BNC è un'uscita digitale (0-5V) che rende disponibile il segnale di sincronizzazione inviato anche alle sonde connesse alla SyncStation tramite segnali a radiofrequenza. Tale segnale si trova nella registrazione di tutte le sonde connesse alla SyncStation

ed anche tra i segnali della SyncStation stessa. Il segnale sul BNC può essere utilizzato per sincronizzare ulteriori sistemi di acquisizione.

- Ethernet: la porta Ethernet della SyncStation può essere connessa direttamente al PC oppure ad uno switch/router tramite un cavo Ethernet. La porta in questione serve per il trasferimento dati dalla SyncStation al PC.
- Connettore di ricarica: sul pannello superiore della base sono presenti 4 alloggiamenti per la ricarica delle sonde Muovi, le quali vengono inserite negli slot utilizzando il connettore di ingresso/ricarica.

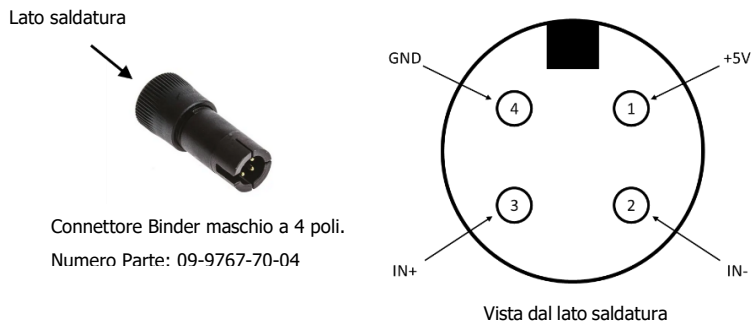


FIG. 7.3: *Dettagli sul connettore per celle di carico della SyncStation*

7.2.2 Indicatori LED

Per identificare lo stato della base SyncStation, la connessione delle sonde e lo stato di ricarica delle sonde, sono stati installati 21 LED. Ciascuno di essi riflette lo stato di una diversa attività del dispositivo:

- 1) Il "LED di stato" tricolore è correlato allo stato della base, il LED lampeggia arancione nella fase di avvio della SyncStation, il LED smette di lampeggiare e diventa verde fisso, nel momento in cui

l'applicazione che gestisce la SyncStation é in esecuzione. Il led tricolore diventa rosso in caso di errore nel funzionamento della SyncStation.

- 2) I 16 "LED di connessione" indicano la connessione WiFi dei dispositivi wireless associati. La SyncStation è progettata per poter ricevere segnali sia dalle quattro sonde Muovi che da ulteriori dispositivi come le sonde Muovi+, Due+, Sessantaquattro, Sessantaquattro+ e Quattro+. Quando uno di questi led si accende significa che il dispositivo corrispondente è collegato alla SyncStation ed è pronto per trasmettere dati.
- 3) I 4 "LED ricarica sonde" indicano lo stato di ricarica delle sonde Muovi quando queste sono fisicamente inserite negli slot di ricarica. I led sono accesi durante la ricarica e si spengono quando la ricarica è completa. Le sonde Muovi, quando vengono inserite negli slot di ricarica si spengono automaticamente.

7.2.3 Controlli

Pulsante di Trigger: la base SyncStation, durante l'acquisizione dati, invia autonomamente degli impulsi di sincronizzazione alle sonde tramite un circuito a radiofrequenza ad intervalli di circa 5 secondi. L'intervallo tra un impulso di sincronizzazione ed il successivo varia in modo da consentire il corretto allineamento a posteriori delle registrazioni fatte. Gli impulsi possono comunque essere generati in qualunque istante premendo il pulsante di trigger che oltre a generare un impulso a radio frequenza genera anche un segnale digitale sul BNC di uscita Trigger Output.

8 UTILIZZO DEL MUOVI PRO

Questo manuale si riferisce all'uso del sistema MuoviPro insieme al PC con sistema operativo Windows ed al software gratuito OT BioLab+. Nel caso si volesse utilizzare un sistema operativo diverso da Windows, oppure, se l'utente volesse personalizzare l'interfaccia, nella sezione download del sito web otbioelettronica.it sono a disposizione i documenti che descrivono il protocollo di comunicazione del sistema MuoviPro ed alcuni codici MatLab di esempio.

8.1 Utilizzo sonda Muovi

8.1.1 Interfaccia WiFi della sonda Muovi

Le sonde Muovi possono essere utilizzate in due modi:

1. all'interno del sistema MuoviPro: questa è la modalità di default, che consente di avere più sonde contemporaneamente attive e sincronizzate tra loro oltre che l'utilizzo dei canali ausiliari della SyncStation;
2. singolarmente, con una connessione diretta con il PC: questa modalità permette di acquisire esclusivamente i segnali provenienti da una sonda Muovi senza possibilità di sincronizzazione con altre sonde o altri dispositivi.

Nel caso in cui una sonda Muovi sia utilizzata all'interno del sistema MuoviPro non è necessario gestire in alcun modo l'interfaccia WiFi che è gestita in modo totalmente automatico dalla SyncStation. La sonda, non appena accesa, si collega alla SyncStation ed è disponibile per iniziare l'acquisizione dei dati.

Nel caso in cui si voglia utilizzare una sonda Muovi direttamente connessa al PC, è invece necessario avviare la sonda tenendo premuto per 5 secondi il pulsante di accensione. I led della sonda inizieranno a lampeggiare per 5 volte contemporaneamente e una volta rilasciato il pulsante la sonda genererà una rete WiFi aperta, senza password, a cui ci si potrà collegare. Il nome della rete WiFi generata sarà

"MVXXX-ID", dove XXX rappresenta il numero seriale della sonda Muovi ed ID il numero identificativo della sonda Muovi che può andare da 1 a 4. In questa modalità la sonda Muovi funge da server DHCP fornendo le impostazioni ai dispositivi connessi alla propria rete, ma un solo dispositivo alla volta può collegarsi alla rete generata dalla sonda Muovi. Questa modalità può essere configurata come la modalità di accensione di default tramite la pagina web interna alla sonda Muovi.

Indipendentemente dalla modalità di funzionamento utilizzata, l'indirizzo IP della sonda Muovi è 192.168.14.ID, dove ID rappresenta il numero identificativo della sonda. La subnet mask è fissa e pari a 255.255.255.0. Digitando l'indirizzo IP su qualsiasi browser, verrà visualizzata la pagina di configurazione interna (fare riferimento alla sezione 8.1.5). La pagina di configurazione consente di verificare le impostazioni correnti del dispositivo, il livello di batteria e di modificare alcune impostazioni che verranno mantenute anche dopo aver spento la sonda.

Inoltre, il software OT BioLab+ mette a disposizione un pulsante nella finestra di configurazione per aprire direttamente la pagina web del Muovi.

8.1.2 Segnali

La risoluzione nativa del Muovi è di 24 bit ottenuti campionando i segnali con un convertitore A/D sigma-delta. I segnali sono acquisiti accoppiati in DC e l'unico filtraggio hardware esistente è un semplice filtro antialiasing a 154 kHz.

La frequenza di taglio del filtro passa-basso implementato all'interno dell' A/D converter è impostata in base alla frequenza di campionamento e corrisponde a circa $\frac{1}{4}$ di quest'ultima. L'acquisizione con tutti i 24 bit è destinata ai segnali EEG accoppiati in DC ad una frequenza massima di campionamento di 500 Hz. Per la raccolta dei dati EMG, viene implementato un filtro passa-alto firmware (solo sui segnali bioelettrici, quindi non sull'IMU) che rimuove la componente DC e sposta la linea di base dei segnali al

centro della dinamica. Questa condizione rende possibile l'acquisizione dei segnali EMG con una risoluzione ridotta di 16 bit. Il formato dei dati in entrambi i casi, 24 bit e 16 bit, è big endian.

Il filtro è implementato sottraendo ai segnali la media mobile esponenziale, ottenuta da:

$$\mathbf{Media_ChX[t] = (1-\alpha) Media_ChX[t-1] + \alpha ChX[t]}$$

Dove α è uguale a $1/2^5$. Il risultato è un filtro passa alto con una frequenza di taglio di 10,5 Hz, durante il campionamento dei segnali a 2000 Hz. Più in generale, la frequenza di taglio passa-alto è $F_{\text{samp}}/190$.

È possibile impostare due diverse frequenze di campionamento: 500 Hz e 2000 Hz. Scegliendo la seconda viene automaticamente settato il filtro passa alto e la risoluzione a 16 bit. Questa modalità è pensata per l'acquisizione di segnali EMG. La frequenza di campionamento di 500 Hz invece imposta il campionamento full-DC e la risoluzione a 24 bit, pensata per l'acquisizione di segnali EEG.

I convertitori A/D hanno ingressi differenziali che consentono agli ingressi positivi e negativi di oscillare teoricamente tra ± 2.4 V. Nel caso del Muovi, il limite è imposto dalla tensione di alimentazione che è di 3,3V. L'ingresso positivo viene alimentato con i segnali dagli elettrodi, i segnali negativi sono collegati al riferimento del paziente (punto centrale dell'alimentazione). Il bit meno significativo (LSB) dei segnali è ottenuto da:

$$\mathbf{LSB = ADC_{\text{RANGE}}/2^{24} = 286.1 \text{ nV}}$$

Quando la risoluzione a 16 bit viene impostata, solo i 16 bit meno significativi vengono trasferiti per i segnali bioelettrici e questo introduce una limitazione nel range del segnale a 18,75 mV_{pp}.

La Tabella 8.1 riassume i diversi intervalli di ingresso, i valori LSB, RMS e rumore da picco a picco con le diverse impostazioni di acquisizione per segnali bioelettrici.

Risoluzione	Range Ingresso	LSB	Rumore RMS R.T.I.	Rumore P-P R.T.I.
16 bits	18,75 mV	286.1 nV	0.6 – 1.2 μ V	3.6 – 7.8 μ V
24 bits	3,3 V	286.1 nV	0.6 – 1.2 μ V	3.6 – 7.8 μ V

TAB. 8.1. *Caratteristiche dei segnali acquisiti con differenti configurazioni. Il range del rumore è correlato alle differenti frequenze di campionamento.*

Oltre ai segnali biologici, sono presenti 4 canali provenienti da un sensore inerziale e 2 canali accessori. Tutti e 6 i canali sono rappresentati su 16 o 24 bit coerentemente con la risoluzione dei segnali bioelettrici. In altri termini, se i segnali bioelettrici acquisiti sono EMG e la risoluzione è 16 bit, anche i 6 canali aggiuntivi sono rappresentati su 16 bit. Viceversa, se i segnali acquisiti sono EEG, tutti i canali saranno rappresentati a 24 bit, ma senza alterare l'informazione contenuta, solo estendendo i numeri con una rappresentazione su 24 bit.

I primi quattro canali aggiuntivi (canali 33, 34, 35 e 36) sono i dati relativi all'IMU (Unità di Misura Inerziale) presente in ogni sonda Muovi, e corrispondenti rispettivamente ai quaternioni W, X, Y e Z derivati dai 3 sensori integrati: accelerometro, giroscopio e magnetometro. Il sensore inerziale utilizzato è il BNO055 della Bosch configurato in "Fusion Mode - NDOF" con i range di misura di default ed orientazione assoluta rispetto al vettore di gravità ed il nord magnetico. La risoluzione reale dei dati del quaternione è 14 bit, estesa con segno a 16 o 24 bit in funzione della modalità di acquisizione della sonda Muovi. I quaternioni sono frutto di un calcolo interno al sensore inerziale e sono aggiornati ad una frequenza di 100 Hz, quindi, nel caso di campionamento a 2000 Hz, ci saranno 20 campioni con gli stessi valori dei quaternioni prima di ottenere un nuovo set di valori per i quaternioni. In figura 8.1 viene mostrato il posizionamento del sensore IMU all'interno di ogni sonda Muovi con indicazione dell'orientamento degli assi.

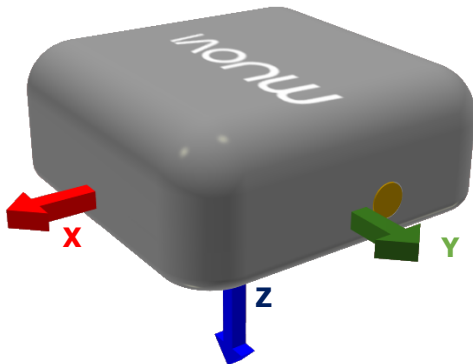


FIG. 8.1: Posizionamento e orientamento sensore inerziale IMU.

I due canali accessori contengono informazioni relative al segnale di sincronizzazione RF inviato dalla SyncStation, all'utilizzo del buffer di memoria interno alla sonda Muovi ed un contatore dei campioni. Questi canali non sono visualizzati dal software OT BioLab+ durante la visualizzazione dei dati in realtime ma possono essere verificati a posteriori per verificare eventuali perdite di campioni.

In particolare, il canale 37 ha un bit dedicato a indicare lo stato del segnale di sincronizzazione, 7 bits dedicati al Trigger code e 8 bits dedicati a indicare l'utilizzo del buffer interno:

Canale 37 (Canale Accessorio n. 1)											
bit 23	...	bit 16	bit 15	bit 14	bit 13	...	bit 8	bit 7	bit 6	...	Bit 0
0	...	0	TRIG	TR_CODE6	TR_CODE5	...	TR_CODE0	0	BUF6	...	BUF0

bit 23-16 Non utilizzati, fissi a 0. Questi bit non sono presenti quando la risoluzione è 16 bit.

bit 15 TRIG: rappresenta il livello del segnale di trigger campionato allo stesso istante dei segnali bioelettrici.

- bit 14-8 TR_CODE <6..0>: Trigger code. Viene utilizzato per contrassegnare ogni impulso di trigger con un codice compreso tra 1 e 127 per facilitare l'allineamento offline tra i diversi dispositivi e la SyncStation. Il tempo per l'elaborazione del TR_CODE può variare e il codice può apparire in un campione di sottosequenza rispetto al campione in cui viene rilevato l'impulso di trigger.
- bit 7 Non utilizzato, fisso a 0.
- bit 6-0 BUF<6:0>: indicatore di utilizzo del buffer FIFO interno al Muovi. Tale valore moltiplicato per otto fornisce il numero di byte di memoria occupati da campioni precedentemente acquisiti e non ancora inviati tramite WiFi. La dimensione massima del buffer FIFO è pari a 190152 byte.

Il secondo canale accessorio (canale 38) è un contatore di campioni. Questo viene incrementato ad ogni nuovo campione acquisito e può essere usato per verificare se uno o più campioni sono stati persi. La differenza tra due valori successivi infatti indica quanti campioni sono trascorsi dal precedente campionamento e nel caso in cui alcuni dati siano andati persi è possibile individuare quanti siano i campioni persi. Il contatore una volta arrivato al valore più grande possibile con la corrispondente risoluzione, riparte da capo con il conteggio.

8.1.3 Elettrodi di prelievo e connessione al paziente

La sonda Muovi si collega direttamente agli elettrodi di prelievo, non sono quindi necessari ulteriori adattatori o cavi. Nel caso di acquisizione di segnali HD-sEMG sono disponibili due modelli di matrici collegabili alle sonde Muovi:

- HD20MM1602: matrice adesiva semiriutilizzabile a 32 elettrodi 16 righe x 2 colonne, con distanza interelettrodoica (IED) 20mm.
- HD10MM0804: matrice adesiva semiriutilizzabile a 32 elettrodi 8 righe x 4 colonne con IED 10mm.

Sulla parte posteriore del connettore di ogni matrice è presente una linguetta rigida, che serve per facilitare l'inserimento e la rimozione della matrice dalla sonda (vedi Fig. 8.2). Le matrici di prelievo vengono definite semiriutilizzabili, in quanto, per l'utilizzo sul paziente, devono essere applicate andando ad interporre tra matrice e cute uno strato di foam fustellato biadesivo e della crema conduttiva. Il foam biadesivo è monouso, mentre la matrice di elettrodi può essere riutilizzata, dopo essere stata pulita, utilizzando un panno asciutto, fino ad usura o ossidazione degli elettrodi di prelievo stessi.



FIG. 8.2: Matrice adesiva semiriutilizzabile HD10MM0804.

Indipendentemente dalla matrice di prelievo utilizzata, la sonda Muovi deve essere collegata al paziente con una fascetta o elettrodo di riferimento, questa operazione è necessaria per fissare il potenziale del corpo del paziente, al potenziale di riferimento interno alla sonda Muovi, a tale scopo, sulla sonda è disponibile un connettore a banana femmina da 2 mm.

Tutti i segnali registrati dalla sonda Muovi sono acquisiti in modalità monopolare, rispetto al riferimento del paziente, per questo motivo è importante che la fascetta o l'elettrodo di riferimento del paziente, siano posizionati su un punto privo di attività elettromiografica e possibilmente vicino all'elettrodo per il rilevamento dei biopotenziali. I segnali differenziali si possono ottenere via software sia on-line che off-line, durante l'elaborazione dati.

La sonda Muovi è stata progettata come dispositivo mobile, per questo motivo, la ricarica della sua batteria avviene attraverso lo stesso connettore utilizzato anche per la connessione degli elettrodi, con

questa soluzione si rende impossibile la connessione simultanea del paziente e della fonte di alimentazione per la ricarica.

Misura dell'impedenza

Ogni sonda Muovi consente di misurare l'impedenza di contatto elettrodo-cute, per ogni elettrodo collegato. La misura viene effettuata collegando alternativamente a tutti gli ingressi del dispositivo resistenze di pull-up e pull-down da 10 Mohm e consentendo una misura dell'impedenza a $\frac{1}{4}$ della frequenza di campionamento. Il segnale così generato ha ampiezza inversamente proporzionale a quella del contatto elettrodo-cute che consente il calcolo del valore di impedenza per ogni canale.

8.1.4 Procedura di ricarica delle sonde Muovi

Le sonde Muovi possono essere ricaricate mediante il proprio connettore di ingresso/ricarica la cui controparte è disponibile sulla base SyncStation. Con la base SyncStation è possibile ricaricare fino a quattro sonde contemporaneamente. Le sonde Muovi si spengono automaticamente quando sono messe in ricarica. Per ricaricare le sonde Muovi seguire gli step sotto descritti:

1. Alimentare la SyncStation collegando l'alimentatore a 12V_{DC} fornito nel KIT del sistema MuoviPro
2. Quando uno slot di ricarica sulla SyncStation è libero, il LED di carica associato è spento
3. Inserire la sonda Muovi da ricaricare in uno slot libero. Il led di ricarica associato si accende, ciò indica che la sonda Muovi è in ricarica
4. Una volta terminata la ricarica, il LED si spegne.

8.1.5 Trasferimento dei dati wireless

Nel caso in cui si utilizzino una o più sonde Muovi con la SyncStation, questa fa da hub e riceve i segnali di tutti i dispositivi ad essa connessi, aggiunge i dati acquisiti dai canali ausiliari, combina tutte le informazioni e le inoltra ad un PC connesso tramite ethernet. La comunicazione tramite interfaccia Ethernet avviene utilizzando un protocollo TCP: viene aperto un socket TCP sulla porta 54320 a cui il PC può collegarsi come client. Tramite una stringa di controllo il PC può configurare l'acquisizione e far partire il trasferimento dati. I dati trasmessi dalla SyncStation appaiono come in arrivo da un unico dispositivo con un numero di canali pari alla somma di tutti i canali attivi di tutte le sonde collegate e di tutti gli IMU e canali accessori/ausiliari.

Nel caso in cui la comunicazione sia diretta tra sonda Muovi e PC, la rete è generata dalla sonda Muovi (fare riferimento al paragrafo 8.1.1) ma è il PC (o tablet, smartphone) a dover aprire un TCP socket con il ruolo di server a cui la sonda Muovi cercherà di connettersi. La sonda infatti conosce l'indirizzo IP del PC in quanto è stato assegnato dalla sonda stessa con il protocollo DHCP. Una volta stabilita la connessione TCP è possibile inviare il byte di controllo alla sonda per configurare l'acquisizione e dare il via al trasferimento dati.

Indipendentemente dal tipo di acquisizione (diretta o tramite SyncStation), i dati vengono bufferizzati all'interno della sonda e sono inviati in pacchetti di circa 1400 byte appena possibile. Se il PC non è in grado di ricevere dati o se la connessione WiFi non lo permette, questi iniziano ad accumularsi all'interno dei buffer fino a riempire il buffer stesso. Se questa condizione si verifica i dati verranno persi fino a quando il PC e la connessione WiFi non saranno nuovamente disponibili per il trasferimento.

8.1.6 Pagina web interna Muovi

La sonda Muovi ha una pagina web interna che permette di visualizzare e modificare alcune impostazioni. Per raggiungere la pagina web è necessario essere connessi alla rete della sonda Muovi o alla SyncStation. L'indirizzo IP del PC e la subnet mask devono essere nello stesso intervallo di quelli della

sonda Muovi o della SyncStation. La pagina web interna può essere aperta digitando l'indirizzo IP della sonda Muovi nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser.

L'indirizzo IP è composto da una prima parte fissa ed uguale per tutte le sonde Muovi, Muovi+, Due+, Quattro+: 192.168.14.X, mentre la X rispecchia l'ID della sonda.

Nella tabella 8.2 sono riportati i dettagli e le corrispondenze tra le diverse sonde, il loro ID e l'indirizzo IP.

Alternativamente, può essere utilizzato il software OT BioLab+ per raggiungere la pagina web. Quando la sonda Muovi è impostata come Dispositivo, nel SW OT BioLab+ è disponibile il pulsante "WebPage" a cui si può accedere da Setup, selezionando il dispositivo Muovi nella lista.

Quando la sonda Muovi è collegata direttamente al PC l'accesso alla pagina web è diretto. Quando invece le sonde sono collegate alla SyncStation ed anche il PC è collegato tramite un cavo ethernet, la SyncStation fa da bridge tra la rete verso il PC e la rete a cui si collegano le sonde. È però necessario informare il PC su cui si sta tentando di aprire la pagina web che l'indirizzo cercato va raggiunto tramite un bridge. Questo può essere fatto modificando la routing table del PC ed informando il sistema operativo che il range di indirizzi 192.168.14.X è raggiungibile attraverso l'indirizzo 192.168.76.1. La modifica della routing table viene fatta automaticamente durante l'installazione del software OT BioLab+.

La pagina ha sezioni diverse, ogni sezione ha un'area informazioni nell'angolo in basso a destra. Spostando il cursore del mouse su quest'area apparirà una spiegazione della corrispondente sezione. Segue una descrizione di ciascuna sezione della pagina web. In figura 8.3 è riportato un esempio di pagina web del Muovi.

Indirizzo IP	Dispositivo	ID	Num. di Serie	Note
192.168.14.1	Muovi	1	MVXXX-1	Le sonde Muovi hanno un indirizzo IP identificato dal loro ID o dal numero di serie.
192.168.14.2		2	MVXXX-2	
192.168.14.3		3	MVXXX-3	
192.168.14.4		4	MVXXX-4	
192.168.14.5	Muovi+	5	MPXXX-5	Una o entrambe le sonde Muovi+ possono essere rimpiazzate dai dispositivi Sessantaquattro e Sessantaquattro+. È sufficiente configurarli tramite la loro pagina web interna.
192.168.14.6		6	MPXXX-6	
192.168.14.7	Due+	7	DPXXX-7	Le sonde Due+ hanno un indirizzo IP identificato dal loro ID o dal numero di serie.
192.168.14.8		8	DPXXX-8	
192.168.14.9		9	DPXXX-9	
192.168.14.10		10	DPXXX-10	
192.168.14.11		11	DPXXX-11	
192.168.14.12		12	DPXXX-12	
192.168.14.13		13	DPXXX-13	
192.168.14.14		14	DPXXX-14	
192.168.14.15	Quattro+	15	QPXXX-15	Le sonde Quattro+ hanno un indirizzo IP identificato dal loro ID o dal numero di serie.
192.168.14.16		16	QPXXX-16	

TAB. 8.2: *Corrispondenza tra indirizzi IP, tipi di sonde, ID e numeri di serie.*



muovi

<div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">General Informations</div> <p>Serial Number: MVD17-3 MAC address: 98:84:E3:4F:C8:29 Firmware Version: 3.2.1 Battery Level: 93%</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">info</p>	<div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">Network settings</div> <p>DHCP Client: Disabled IP Address: 192.168.14.3 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.14.100 DNS Server: 192.168.14.100 Server IP Addr: 192.168.14.17 Server TCP Port: 54321</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">info</p>
<div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">General settings</div> <p>Auto shutdown: 30 minutes <input type="button" value="v"/> Always start as AP: No <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Apply"/></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">info</p>	<div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">Firmware Upgrade</div> <p style="font-size: x-small; color: #ccc;">The firmware cannot be updated if muovi has been started temporarily as Access Point. To upgrade the firmware, connect the muovi to the SyncStation or set the "Always Access Point" option and restart the muovi.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">info</p>

FIG. 8.3: Pagina web interna del Muovi.

Informazioni Generali

Questa sezione fornisce informazioni che non possono essere modificate: numero di serie, indirizzo MAC, versione del firmware e livello della batteria. Per aggiornare il livello della batteria è necessario aggiornare la pagina web.

Impostazioni generali

Permette di selezionare l'autospegnimento della sonda tra: mai, 15 minuti, 30 minuti o 1 ora. Permette di impostare come default la modalità access point per il collegamento diretto della sonda Muovi con il PC. Normalmente le sonde Muovi cercano di collegarsi alla SyncStation, ma se all'accensione il pulsante viene tenuto premuto per più di 5 secondi (fare riferimento al paragrafo 8.1.1) la sonda crea

una propria rete WiFi. È possibile rendere questa modalità quella di default in modo che la sonda parta sempre in questa condizione indipendentemente dalla durata con cui viene premuto il pulsante.

Informazioni di rete

Questa sezione riporta le informazioni sulla rete del Muovi che non possono essere modificate.

Aggiornamento firmware

L'aggiornamento firmware del Muovi è possibile tramite upload di un file compresso contenente il firmware stesso. Premendo il pulsante si aprirà una nuova pagina con le istruzioni necessarie per procedere e mostrerà l'avanzamento del processo. In una prima fase il file verrà caricato all'interno della memoria Flash del Muovi e verranno estratti i file dal file compresso. In seguito, il Muovi si riavvierà automaticamente cercando di partire con il nuovo firmware e di ritornare in collegamento con il PC. Se questo non accade il file caricato verrà scartato ed il firmware tornerà ad essere quello precedente. È importante che il livello della batteria del dispositivo non sia troppo basso durante l'aggiornamento del firmware e che consenta di arrivare alla fine della procedura.

8.1.7 Nomenclatura sonde

Al fine di aiutare a identificare le sonde Muovi, capire il ruolo che hanno all'interno del sistema MuoviPro e consentire di raggiungere la pagina web interna, il numero di serie di ogni sonda è costituito da un codice composto da tre parti:

MV123-4

Dove:

- "MV": sono le lettere che identificano il tipo di dispositivo (MV = Muovi, MP = Muovi+, DP = Due+, QP = Quattro+)
- "123": numeri comuni a tutti i dispositivi facenti parte dello stesso sistema (da 000 a 999)

- "4": un numero che rappresenta l'ID della sonda e corrisponde all'ultima parte dell'indirizzo IP della stessa. L'indirizzo IP di tutti i dispositivi wireless è 192.168.14.X dove X è l'ID della sonda. Quindi, per l'esempio citato l'indirizzo IP risulta essere: 192.168.14.4.

Fare riferimento alla tabella Tabella 8.2 per i dettagli relativi agli indirizzi IP e la corrispondenza con gli ID e numeri di serie delle sonde.

8.2 Utilizzo della SyncStation

8.2.1 Interfacce di rete della SyncStation

La SyncStation viene utilizzata sia per la ricarica delle sonde Muovi, sia per il trasferimento dati simultaneo di più sonde Muovi e/o altri dispositivi al PC. La funzione principale della SyncStation è di agire come concentratore di dati da un punto di accesso WiFi, che accetta le connessioni di dispositivi wireless, verso un PC, tramite un'interfaccia ethernet. Si possono connettere contemporaneamente alla SyncStation:

- fino a quattro sonde Muovi;
- fino a due sonde Muovi+ oppure due Sessantaquattro o due Sessantaquattro+;
- fino a otto sonde Due+;
- fino a due sonde Quattro+.

Ai segnali provenienti dai dispositivi wireless connessi vanno aggiunti quattro segnali ausiliari acquisiti dai connettori presenti sulla SyncStation e due canali accessori con informazione sullo stato del Trigger, lo stato del buffer interno ed un contatore dei campioni. A tutti i dati ricevuti dai dispositivi connessi vengono aggiunti quindi i 6 canali ausiliari/accessori e tutti i dati vengono maneggiati per apparire al PC collegato alla presa Ethernet della SyncStation come un unico flusso di campioni multiplexati di un unico dispositivo con un numero di canali pari alla somma dei canali gestiti. La SyncStation ha quindi due diverse interfacce di rete i cui dettagli sono riportati nella tabella 8.3.

	Rete verso dispositivi wireless	Rete verso il PC
Descrizione	WiFi nascosta dedicata esclusivamente alla connessione dei dispositivi wireless Muovi, Muovi+, Due+, Sessantaquattro, Sessantaquattro+ e Quattro+	Ethernet verso il PC per l'acquisizione dati
IP SyncStation	192.168.14.100	192.168.76.1
IP dispositivi connessi	192.168.14.1 – 192.168.14.16 IP fissi dispositivi wireless	192.168.76.X assegnato al PC con DHCP
TCP socket SyncStation	54321 – SyncStation è il server TCP	54320 – SyncStation è il server TCP

TAB. 8.3: Dettagli delle due interfacce di rete implementate dalla SyncStation

8.2.2 Trasferimento dati verso il PC

Su entrambe le interfacce viene aperto un socket TCP server che permette da un lato la connessione dei vari dispositivi wireless e dell'altro del PC. Una volta stabilite le connessioni tramite i socket TCP, la SyncStation riceve una stringa di controllo da parte del PC, smista i comandi verso i diversi dispositivi wireless connessi ed inizia a ricevere dati dalle sonde ed inoltrarli verso il PC. I dati ricevuti dalle sonde arrivano in pacchetti con dimensioni che dipendono dal tipo di sonda e dalla configurazione (vedere le tabelle 8.4 – 8.8). I dati trasmessi al PC sono inviati in blocchi che dipendono dalla configurazione delle sonde. I blocchi inviati contengono tutti i campioni di tutti i canali attivi per una durata pari al minore degli intervalli di invio di un pacchetto WiFi tra quelli delle sonde attive (vedere tabelle 8.4 – 8.8). Questo blocco di dati in uscita viene definito come pacchetto dati per il PC.

Per ogni dispositivo connesso e configurato, e per gli ingressi ausiliari, la SyncStation alloca una certa quantità di memoria come buffer di ingresso, tale da contenere 32 pacchetti WiFi per ogni sonda.

I dati ricevuti vengono temporaneamente scritti nei rispettivi buffer di ingresso in attesa di essere processati e copiati in un buffer di uscita. Quando un intero pacchetto dati per il PC è disponibile all'interno del buffer di uscita, questo viene mandato al PC.

Se i dati di qualche dispositivo non sono ricevuti entro un termine massimo di tempo, il pacchetto dati per il PC viene comunque mandato inserendo dei valori pari a 0 nei campioni del dispositivo mancante. La figura 8.4 descrive graficamente la gestione dei pacchetti in ingresso ed uscita.

Il buffer di uscita può contenere fino a 210 campioni di tutti i canali e di tutti i dispositivi connessi. Il limite massimo per inviare i dati al PC anche in assenza di dati da tutte le sonde è pari a 200 campioni accumulati nel buffer. Tali campioni sono scanditi dal campionamento dei segnali AUX all'interno della SyncStation.

Si evidenzia che non necessariamente un "buco" tra i dati mostrati in tempo reale durante l'acquisizione dei segnali rappresenta una reale perdita di dati. I dati potrebbero semplicemente non essere disponibili temporaneamente ma comunque salvati nei buffer interni alle sonde e inviati successivamente.

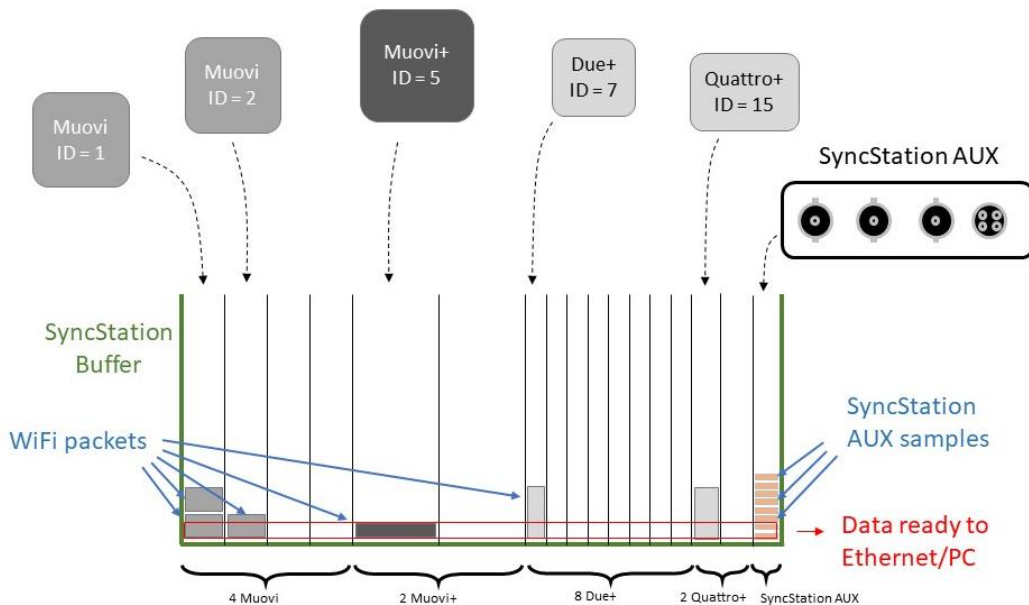


FIG. 8.4: Rappresentazione grafica semplificata della gestione dei dati da parte della SyncStation: i pacchetti ricevuti tramite WiFi dalle varie sonde attive vengono accumulati in buffer FIFO così come i campioni acquisiti dai canali ausiliari. Quando sono disponibili un numero minimo di campioni da tutti i dispositivi attivi, un pacchetto dati per il PC contenente campioni di tutti i dispositivi viene inviato tramite Ethernet al PC. Un timer interno determina un limite di tempo massimo entro cui si può verificare la condizione di invio. Nel caso in cui essa non si verifichi in tempo a causa di pacchetti non ricevuti da una o più sonde (sonde non disponibili, in ritardo, non connesse ecc...), i dati mancanti vengono sostituiti con zeri.

Nel caso in cui tutte le sonde connesse siano configurate per l'acquisizione di segnali EEG (Frequenza di campionamento 500 Hz) anche i canali ausiliari e accessori della SyncStation verranno campionati a 500Hz in modo da avere un campione di ogni canale coerentemente per tutti i canali acquisiti. Lo stesso principio viene applicato se tutte le sonde sono configurate per acquisire segnali EMG campionati a 2000 Hz. Nel caso in cui invece, alcune sonde siano configurate per acquisizione di segnali EMG ed altre per acquisizione di segnali EEG, la SyncStation esegue 3 repliche dei campioni EEG per ottenere tutti i dati campionati con la frequenza di campionamento maggiore, ovvero 2000 Hz.

In ogni caso, i campioni ottenuti da sonde configurate come EMG saranno su 16 bit, i campioni ottenuti da sonde configurate come EEG saranno su 24 bit, i campioni ottenuti dai canali ausiliari ed accessori della SyncStation saranno su 16 bit. Nel caso in cui si intenda sviluppare un proprio software/applicazione per la lettura dei dati questo aspetto va gestito all'interno del software/applicazione.

Ulteriori dettagli tecnici che descrivono il sistema di accumulo dei dati e successivo invio al PC sono riportati nelle Tabelle 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Muovi		
Modalità	Parametro	Valore
-	Numero di canali Sonda Muovi	32 bioelettrici + 4 IMU + 2 Accessori
EMG	Frequenza di campionamento	2000 Hz
	Risoluzione	16 bit
	Dimensione di ogni campione	76 byte
	Numero di campioni in ogni pacchetto WiFi	18
	Dimensione Pacchetto WiFi	1368 byte
	Intervallo di invio dei pacchetti WiFi	9 ms
	Dimensione del buffer nella SyncStation per una sonda Muovi	87552 byte
EEG	Frequenza di campionamento	500 Hz
	Risoluzione	24 bit
	Dimensione di ogni campione	114 byte
	Numero di campioni in ogni pacchetto WiFi	12
	Dimensione Pacchetto WiFi	1368 byte
	Intervallo di invio dei pacchetti WiFi	24 ms
	Dimensione del buffer nella SyncStation per una sonda Muovi	87552 byte

***TAB. 8.4:** Dati tecnici della sonda Muovi in modalità EMG ed EEG*

Muovi+ / Sessantaquattro / Sessantaquattro+		
Modalità	Parametro	Valore
-	Numero di canali Sonda Muovi+	64 bioelettrici + 4 IMU + 2 Accessori
	Numero di canali Sessantaquattro+	64 bioelettrici + 4 IMU + 2 Accessori
	Numero di canali Sessantaquattro	64 bioelettrici + 2 AUX + 2 Nulli + 2 Accessori
EMG	Frequenza di campionamento	2000 Hz
	Risoluzione	16 bit
	Dimensione di ogni campione	140 byte
	Numero di campioni in ogni pacchetto WiFi	10
	Dimensione Pacchetto WiFi	1400 byte
	Intervallo di invio dei pacchetti WiFi	5 ms
	Dimensione del buffer nella SyncStation	89600 byte
EEG	Frequenza di campionamento	500 Hz
	Risoluzione	24 bit
	Dimensione di ogni campione	210 byte
	Numero di campioni in ogni pacchetto WiFi	6
	Dimensione Pacchetto WiFi	1260 byte
	Intervallo di invio dei pacchetti WiFi	12 ms
	Dimensione del buffer nella SyncStation	80640 byte

TAB. 8.5: Dati tecnici della sonda Muovi+, Sessantaquattro, Sessantaquattro+ in modalità EMG ed EEG. Nel caso di Sessantaquattro e Sessantaquattro+ vengono aggiunti due canali con i campioni sempre a 0 per ottenere lo stesso numero di canali del Muovi+ e per essere del tutto intercambiabile con le sonde Muovi+

Due+		
Modalità	Parametro	Valore
-	Numero di canali sonda Due+	2 bioelettrici + 4 IMU + 2 Accessori
EMG	Frequenza di campionamento	2000 Hz
	Risoluzione	16 bit
	Dimensione di ogni campione	16 byte
	Numero di campioni in ogni pacchetto WiFi	54
	Dimensione Pacchetto WiFi	864 byte
	Intervallo di invio dei pacchetti WiFi	27 ms
	Dimensione del buffer nella SyncStation per una sonda Due+	55296 byte

TAB. 8.6: Dati tecnici della sonda Due+

Quattro+		
Modalità	Parametro	Valore
-	Numero di canali sonda Quattro+	4 bioelettrici + 4 IMU + 2 Accessori
EMG	Frequenza di campionamento	2000 Hz
	Risoluzione	16 bit
	Dimensione di ogni campione	16 byte
	Numero di campioni in ogni pacchetto WiFi	43
	Dimensione Pacchetto WiFi	860 byte
	Intervallo di invio dei pacchetti WiFi	21.5 ms
	Dimensione del buffer nella SyncStation per una sonda Due+	55040 byte

TAB. 8.7: Dati tecnici della sonda Quattro+

SyncStation canali AUX /accessori		
Modalità	Parametro	Valore
-	Numero di canali SyncStation	4 AUX + 2 Accessori
	Frequenza di campionamento	2000/500 Hz
	Risoluzione	16 bit
	Dimensione di ogni campione	12 byte

TAB. 8.8: Dati tecnici relativi ai canali ausiliari ed accessori della SyncStation. La frequenza di campionamento dei canali nella SyncStation è di default pari a 2000 Hz, scende a 500 Hz nel caso in cui tutte le sonde utilizzate siano configurate per l'acquisizione di segnali EEG.

In coda a tutti i canali delle sonde wireless attive la SyncStation aggiunge quattro canali ausiliari e due canali accessori. Questi sono sempre con risoluzione di 16 bit. I quattro canali ausiliari della SyncStation riportano i campioni ottenuti dalla conversione analogico/digitale dei corrispondenti ingressi ausiliari; quindi, il canale dedicato alla cella di carico è il quarto canale ausiliario. In coda ai quattro canali ausiliari sono presenti, come per la sonda Muovi, due canali accessori. Anche in questo caso il software OT BioLab+ non visualizza questi canali ma li acquisisce ed è possibile vederli a posteriori per verificare la presenza di tutti i campioni.

I due canali accessori contengono informazioni relative al segnale di sincronizzazione RF generato dalla SyncStation (presente sul BNC "SYNC"), all'utilizzo del buffer di memoria interno alla sonda Muovi ed un contatore dei campioni. In particolare, il primo canale accessorio ha un bit dedicato a indicare lo stato del segnale di sincronizzazione, 7 bits dedicati al Trigger code e 8 bits dedicati a indicare l'utilizzo del buffer interno:

Canale Accessorio SyncStation n. 1								
bit 15	bit 14	bit 13	...	bit 8	bit 7	bit 6	...	bit 0
TRIG	TR_CODE6	TR_CODE5	...	TR_CODE0	BUF7	BUF6	...	BUF0

- bit 15 TRIG: rappresenta il livello del segnale di trigger campionato allo stesso istante dei segnali bioelettrici.
- bit 14-8 TR_CODE <6..0>: Trigger code. Viene utilizzato per contrassegnare ogni impulso di trigger con un codice compreso tra 1 e 127 per facilitare l'allineamento offline tra i diversi dispositivi e la SyncStation. Il tempo per l'elaborazione del TR_CODE può variare e il codice può apparire in un campione di sottosequenza rispetto al campione in cui viene rilevato l'impulso di trigger.
- bit 7-0 BUF<7:0>: indicatore di utilizzo del buffer FIFO interno alla SyncStation. Tale valore indica quanti campioni in attesa di essere inviati al PC sono presenti nella SyncStation. Il mancato invio è causato da dati mancanti o non ancora ricevuti da qualche sonda wireless. Il numero massimo di campioni arretrati è pari a 200, dopo di che i dati in attesa sono inviati comunque.

Il secondo canale accessorio è un contatore di campioni. Questo viene incrementato ad ogni nuovo campione acquisito dagli ingressi accessori e può essere usato per verificare se uno o più campioni sono stati persi. La differenza tra due valori successivi infatti indica quanti campioni sono trascorsi dal precedente campionamento e nel caso in cui alcuni dati siano andati persi è possibile individuare quanti siano i campioni persi. Il contatore una volta arrivato a 65535, riparte da 0 con il conteggio.

8.2.3 Pagina web interna SyncStation

La sonda SyncStation ha una pagina web interna che permette di visualizzare e modificare alcune impostazioni. Per raggiungere la pagina web è necessario essere connessi alla SyncStation con un PC tramite un cavo ethernet. L'indirizzo IP del PC e la subnet mask devono essere nello stesso intervallo di quelli della SyncStation. La pagina web interna può essere aperta digitando l'indirizzo IP della SyncStation nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser. L'indirizzo IP è fisso ed è pari a 192.168.76.1.



SyncStation

<div style="background-color: #4a697d; color: white; padding: 2px;">General Informations</div> <p>Serial Number: STP035 MAC address: e4:5f:01:aa:8e:09 Firmware Version: 2.25</p>	<div style="background-color: #4a697d; color: white; padding: 2px;">Network settings</div> <p>DHCP Client: Enabled IP Address: 192.168.76.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Server TCP Port: 54320</p>
<div style="background-color: #4a697d; color: white; padding: 2px;">WiFi Channel</div> <p>Channel: <input type="text" value="6"/> Range: 1..11 Change channel and restart application: <input type="button" value="Apply"/></p>	<div style="background-color: #4a697d; color: white; padding: 2px;">Firmware Upgrade</div> <p>Update firmware: <input type="button" value="Sfoglia File"/> Nessun file selezionato <input type="button" value="Upload File"/></p>

FIG. 8.5: Pagina web interna della SyncStation.

Informazioni Generali

Questa sezione fornisce informazioni che non possono essere modificate: numero di serie, indirizzo MAC, versione del firmware e la possibilità di aggiornare il firmware. L'aggiornamento firmware della SyncStation è possibile tramite upload di un file contenente il firmware stesso. Premendo il pulsante "Sfoglia..." sarà possibile navigare nel proprio PC e scegliere un file da caricare. Una volta selezionato il file, premendo il pulsante "Upload File" l'esecuzione del firmware della SyncStation viene bloccata e il file sostituito al precedente. Per mandare in esecuzione il nuovo firmware è necessario riavviare la SyncStation.

Impostazioni di rete

Questa sezione riporta le informazioni sulla rete della SyncStation che non possono essere modificate.

Canale WiFi

Questa sezione può essere utile qualora non si riesca ad ottenere una comunicazione stabile tra il PC e la SyncStation. Qualora infatti il canale Wifi al quale è collegata la SyncStation sia saturo potrebbe verificarsi una comunicazione poco stabile. I canali più utilizzati per ottenere il massimo throughput e ridurre al minimo gli effetti delle interferenze sono generalmente i canali 1, 6 e 11.

Questa sezione può inoltre essere utilizzata per un semplice restart della SyncStation.

Aggiornamento firmware

L'aggiornamento firmware della SyncStation è possibile tramite upload di un file contenente il firmware stesso. Premendo il pulsante si aprirà una nuova pagina che mostrerà l'avanzamento del processo. In seguito, la SyncStation si riavvierà automaticamente cercando di partire con il nuovo firmware e di ritornare in collegamento con il PC. Se questo non accade il file caricato verrà scartato ed il firmware tornerà ad essere quello precedente.

9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questa sezione descrive i problemi più comuni, in cui si possono imbattere gli utenti del sistema MuoviPro, oltre ai problemi, in Tabella 9.1, sono riportati alcuni suggerimenti per risolverli. Nel caso si verificano problemi non descritti in questa sezione, contattare il servizio di supporto tecnico di OT Bioelettronica.

PROBLEMI GENERALI		
Problema	Possibili cause	Soluzione
Il Muovi non si accende	Il livello della batteria è troppo basso.	Lasciare il dispositivo in carica per almeno un'ora.
	Se un aggiornamento del firmware fosse stato appena eseguito, potrebbe essere successo qualcosa di sbagliato.	Contattare OT Bioelettronica.
La pagina web interna del Muovi o della SyncStation non viene visualizzata all'indirizzo IP previsto	Il PC non è connesso alla stessa rete del Muovi o non si trovano nello stesso intervallo di indirizzi.	Verificare che la connessione sia sulla stessa rete e verificare le impostazioni della scheda di rete sul PC.
	L'indirizzo IP previsto potrebbe essere sbagliato.	Utilizzare OT BioLab+ per raggiungere la pagina web del Muovi
Il dispositivo mostra alcuni segnali piatti (con tutti i valori pari a 0).	Assenza di crema conduttiva su alcuni degli elettrodi.	Controllare che su tutti gli elettrodi sia presente la crema conduttiva ed eventualmente rifare il setup.
	I segnali sono presenti ma saturati per una componente DC più alta.	Nella sezione Preamp Gain del setup (software OTBiolab+) selezionare il valore 4. In questo modo i segnali rientrano nella dinamica ma aumenterà leggermente il rumore. Attenzione: in questo modo viene modificato anche il LSB.

TAB. 9.1: Risoluzione dei problemi generali che possono verificarsi usando il MuoviPro.

10 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL MUOVI PRO

MuoviPro deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni ambientali:

Temperatura:	da 0°C a +40°C
Massima umidità relativa:	75%
Pressione atmosferica:	da 700 hPa a 1060 hPa

Si consiglia di spegnere il sistema MuoviPro ed ogni sua sonda Muovi alla fine di ogni sessione di misura. Il dispositivo MuoviPro deve essere conservato con tutti gli accessori inclusi, nella sua scatola dedicata, lontano da tutte le situazioni elencate nella sezione Avvertenze.

MuoviPro deve essere conservato nelle seguenti condizioni ambientali:

Temperatura:	da -20°C a +40°C
Massima umidità relativa:	75%
Pressione atmosferica:	da 700 hPa a 1060 hPa

Pulizia: utilizzare solo un panno asciutto per pulire il dispositivo.

Si consiglia di pianificare un controllo del dispositivo con il produttore ogni 24 mesi. Il dispositivo MuoviPro deve essere riparato solo dal produttore. Ogni riparazione eseguita da personale non autorizzato verrà considerata come una violazione del dispositivo e invaliderà la garanzia del produttore.

Smaltimento

Il sistema MuoviPro e gli accessori devono essere smaltiti in conformità con le norme relative in aree attrezzate speciali o con rifiuti speciali. Il sistema MuoviPro contiene componenti elettronici che devono essere smaltiti come rifiuti elettronici. Smaltire il dispositivo e gli accessori seguendo le normative locali.

Seguire le normative sullo smaltimento del proprio paese per garantire il corretto smaltimento di MuoviPro e dei suoi accessori. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di questo dispositivo, contattare il Dipartimento Ambiente e le autorità locali.



Avvertenza: non smaltire questo prodotto come rifiuto municipale non differenziato. Raccolta di tali rifiuti separatamente per un trattamento speciale del necessario, in seguito alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Il regolamento non è valido in caso di prodotto danneggiato.

Vita del dispositivo

Se vengono seguite le condizioni di uso e manutenzione indicate in questo Manuale Utente, la durata del sistema MuoviPro è determinata dalla durata della batteria (5 anni), dopo questo periodo si consiglia di far controllare il dispositivo al produttore ogni due anni.

11 ANALISI DEL RISCHIO

11.1 Norme generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali CEI EN 60601-1

- EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Norme generali per la sicurezza
- EN 60601-1-2 Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Norme generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali
- ETSI EN 301 489-1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio - Parte 1: Requisiti tecnici comuni; Standard armonizzato per la compatibilità elettromagnetica

MuoviPro è progettato per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico con le caratteristiche sotto specificate. L'acquirente o utilizzatore del MuoviPro è tenuto ad assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente conforme a tali specifiche.

Dichiarazione del produttore e linee guida – emissioni elettromagnetiche	
Fenomeno	Strutture sanitarie professionali
EN 60601-1-2 e ETSI EN 301 489-1	
Emissioni in radiofrequenza condotte e irradiate	EN 55011:2009 + A1:2010
	EN 55032:2015
Fluttuazioni di tensione/flicker	Conformi a IEC 61000-3-3

TAB. 11.1: Prove effettuate e superate per conformità alle normative sulle emissioni elettromagnetiche.

Dichiarazione del produttore e linee guida – immunità elettromagnetica – porta involucro		
Fenomeno	Norma di riferimento EMC o metodo di prova	Livelli prova immunità - Strutture sanitarie professionali
EN 60601-1-2, EN 60601-2-40 e ETSI EN 301 489-1		
Scariche elettrostatiche	IEC 61000-4-2	+/- 8 kV contatto +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV aria
Campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati	IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campi in prossimità di apparecchiature di comunicazione wireless in radiofrequenza	IEC 61000-4-3	28 V/m 450 MHz, 810 MHz - 2.45 GHz a 217 Hz 27 V/m 385 MHz a 18 Hz 9 V/m 710 MHz – 780 MHz, 5.24 GHz – 5.785 GHz a 217 Hz
Transitorio elettrico veloce/esplosione	IEC 61000-4-4	+/- 2 kV a 100 kHz sul caricatore +/- 1 kV a 5 kHz sul caricatore
Sovratensioni	IEC 61000-4-5	500 V e 1 kV linea a linea 500 V, 1 kV e 2 kV linea verso terra
Disturbi condotti indotti da campi elettromagnetici a radiofrequenza	IEC 61000-4-6	3 V RMS fuori dalla banda ISM 80% AM a 1 kHz 6 V RMS nella banda ISM 80% AM a 1 kHz
Cadute di tensione e interruzioni	IEC 61000-4-11	Alimentazione: 100 V AC, 240 V AC and 230 V AC con DIP pattern: 0V – 10ms; 0V – 20ms; 0.7 Un – 500ms; 0V – 5s Test effettuato sul caricatore
Campi magnetici alla frequenza nominale di rete	IEC 61000-4-8	30 A/m - 50 Hz

TAB. 11.2: Prove effettuate e superate per conformità alle normative vigenti sull'immunità elettromagnetica.

12 DESTINAZIONE D'USO

Il MuoviPro è un dispositivo medico destinato allo studio della biomeccanica del movimento e l'acquisizione dei segnali bioelettrici del sistema neuromuscolare.

Le applicazioni cliniche del sistema sono nell'ambito della:

- riabilitazione neurologica
- protesica

Riabilitazione neurologica

- Il dispositivo consente di ottenere il così detto Bio-feedback, ovvero un riscontro visivo o uditivo, che aiuta il fisioterapista nell'insegnare al paziente a contrarre o rilassare i muscoli-bersaglio. Condizione che si rende necessaria in seguito a lesioni del sistema nervoso centrale o per contrastare la difficoltà di reclutamento di certi gruppi muscolari a causa di prolungata immobilità.

Protesica

- Il dispositivo consente di individuare le aree in cui il segnale elettromiografico è maggiormente intenso, al fine di determinare il posizionamento degli elettrodi delle protesi attive.

13 CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Modello:</i>	MuoviPro
<i>Classe di Rischio:</i>	I in accordo con gli standard MDR 2017/745.
<i>Classe di Isolamento:</i>	Tipo BF con parti applicate, in accordo con gli standard europei EN 60601-1.
<i>Basic UDI</i>	805697785PORTABLEEMG002SF
<i>Classificazione:</i>	IP20, in base alla penetrazione dei liquidi e della polvere; apparecchio non protetto.
<i>Contenitore:</i>	ABS verniciato.
<i>Alimentazione:</i>	Batteria Interna Ricaricabile Li-Po 3.7 V
<i>Consumo medio:</i>	0.6 W
<i>Limitazioni:</i>	Apparecchio non adatto a funzionare in ambienti con alte concentrazioni di ossigeno e/o liquidi infiammabili e/o gas infiammabili; non utilizzare con apparecchi di elettrochirurgia o di terapia ad onde corte o microonde.
<i>Funzionamento:</i>	Dispositivo adattato per funzionamento continuo.
<i>Canali di ingresso:</i>	158 indipendenti: 128 segnali biopotenziali, 16 quaternioni, 4 ausiliari, 10 di controllo.
<i>Range di ingresso:</i>	0 – 3.3 V per segnali biopotenziali, ± 5 V per segnali ausiliari.
<i>Rumore riferito all'ingresso:</i>	$< 6 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$
<i>Banda:</i>	DC ÷ 500 Hz
<i>Amplificazione:</i>	1 V/V per segnali bioelettrici, 0.5 V/V per segnali ausiliari.
<i>Risoluzione:</i>	16/24 bits
<i>Resistenza di ingresso:</i>	500 M Ω
<i>Comandi:</i>	1 pulsante per dispositivo
<i>Dimensioni:</i>	Sonda: 40 x 40 x 17 mm Base: 178 x 178 x 29 mm
<i>Peso:</i>	Sonda: 38g Sistema: 725 g

14 GARANZIA

MuoviPro è coperto da garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto sulle parti elettroniche. La garanzia decade in caso di manomissione dell'apparecchio ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato. Le condizioni di garanzia sono quelle descritte tra le "Norme di garanzia".

14.1 Condizioni di garanzia

1. La durata della garanzia è di 24 mesi sulle parti elettroniche. La garanzia viene fornita dal costruttore.
2. La garanzia copre esclusivamente i danni del prodotto che ne determinano un cattivo funzionamento. Il prodotto garantito dovrà riportare numero di serie uguale a quello indicato nel certificato di vendita, pena l'invalidità della garanzia.
3. Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, mano d'opera compresa.
4. La garanzia non si applica in caso di: danni provocati da incuria, uso non conforme alle istruzioni fornite, danni provocati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente (particolare riferimento alle parti esterne).
5. La garanzia non si applica inoltre a danni causati all'apparecchio da alimentazioni non previste.
6. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo.
7. La garanzia non include i costi di trasporto che saranno a carico dell'acquirente in relazione ai modi ed ai tempi del trasporto.
8. Trascorsi 24 mesi la garanzia decade. In tal caso gli interventi di assistenza verranno eseguiti addebitando le parti sostituite, le spese di manodopera e le spese di trasporto secondo le tariffe in vigore.

Progettato e distribuito da:

OT Bioelettronica s.r.l.

Via San Marino 21

10134 – Torino (TO) - ITALY

Tel: +39.011.19720518

Fax: +39.011.19720519

www.otbioelettronica.it

mail@otbioelettronica.it