


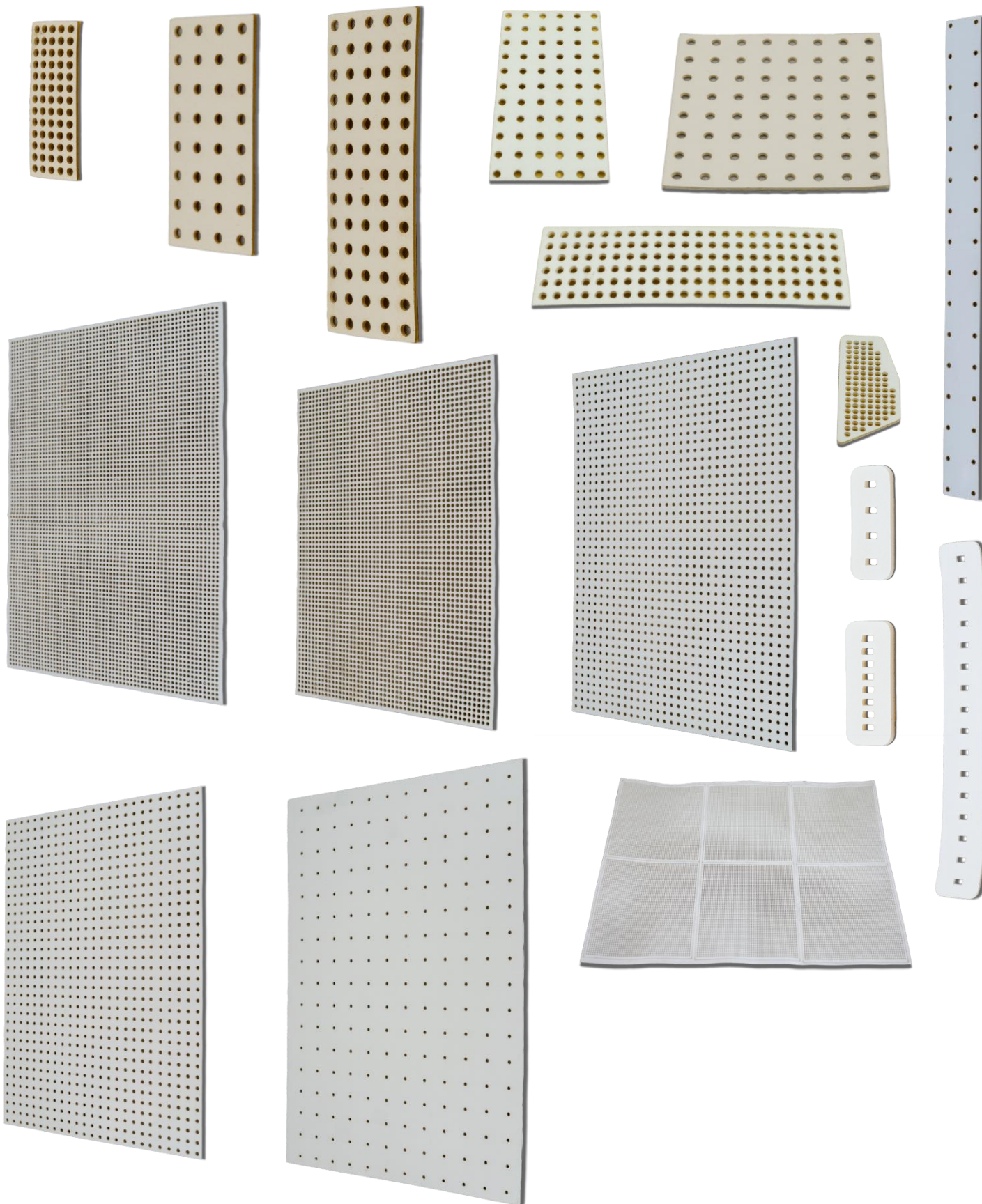

OT Bioelettronica offre un set di schiume biadesive per acquisizioni elettromiografiche di superficie, certificate per l'utilizzo a contatto con la pelle integra secondo ISO 10993-1.

Le schiume biadesive sono composte da 3 strati:

- 2 strati di E1522 3M: ipoallergenico, supporto trasparente, ampia gamma di adesione e testato ISO 10993-1 per utilizzo in contatto con pelle integra per applicazioni a breve termine (al massimo 29 giorni)
- 1 strato di 8919: schiuma di polietilene a cella chiuse interposta tra i due strati E1522

Le schiume biadesive vengono forate a laser con distanza inter-foro variabile a seconda del modello di matrice adesiva corrispondente.

Utilizzo: rimuovere lo strato protettivo della schiuma biadesiva e applicare sulla matrice, riempire i fori crema conduttiva per creare il contatto tra la cute e gli elettrodi, in seguito rimuovere il secondo strato protettivo e applicare su cute integra.

Descrizione

OT Bioelettronica offre un foam doppio strato medicale biadesivo, per acquisizioni EMG, da interporre tra matrice HD e cute integra. Il foam è presente in 21 diverse configurazioni con differente distanza interelettroica IED. Lo spessore ridotto e l'adesività garantiscono un posizionamento ed un contatto ottimale.

CND Z12100480

Materiali

Salute

Specifiche prodotto

Strato medicale (DOPPIO STRATO)

Foam	PE a doppio rivestimento 0,16mm
Film di supporto	PE trasparente 0,08mm
Adesivo	Acrilato per uso medicale

Strato industriale (centrale)

Foam	PE a doppio rivestimento 0,8mm
Film di supporto	Carta bi-siliconata
Adesivo	Acrilato

Packaging

Busta	Carta ATICELCA 501
-------	--------------------

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Lattice	No
Ftalati	No

Codice generico	FOAXXMMXXYY
Numero di modelli	21

Modelli

OT0317	FOA02MM5853	Foglio 340x250mm con IED 2mm
OT0300	FOA03MM1807	96 fori con IED 3mm, 18 x 7
OT0310	FOA03MM10475	Foglio 340x250mm con IED 3mm (no ph)
OT0214	FOA04MM1305	64 fori con IED 4mm, 13 x 5
OT0324	FOA04MM1606	96 fori con IED 4mm, 16 x 6 (no ph)
OT0284	FOA04MM2206	128 fori con IED 4mm, 22 x 6
OT0220	FOA04MM8461	Foglio 340x250mm con IED 4mm
OT0253	FOA05MM0108	8 fori con IED 5mm, 1 x 8
OT0331	FOA05MM3201	32 fori con IED 5mm, 32 x 1 (no ph)
OT0219	FOA05MM6749	Foglio 340x250mm con IED 5mm
OT0285	FOA08MM1106	64 fori con IED 8mm, 11 x 6
OT0213	FOA08MM1305	64 fori con IED 8mm, 13 x 5
OT0323	FOA08MM1606	96 fori con IED 8mm, 16 x 6 (no ph)
OT0218	FOA08MM4231	Foglio 340x250mm con IED 8mm
OT0254	FOA10MM0104	4 fori con IED 10mm, 1 x 4
OT0252	FOA10MM0116	16 fori con IED 10mm, 1 x 16
OT0215	FOA10MM0804	32 fori con IED 10mm, 8 x 4
OT0212	FOA10MM0808	64 fori con IED 10mm, 8 x 8
OT0217	FOA10MM3425	Foglio 340x250mm con IED 10mm
OT0216	FOA20MM1602	32 fori con IED 20mm, 16 x 2
OT0221	FOA20MM1712	Foglio 340x250mm con IED 20mm